

## 保守点検実施記録書

実施年月日 広島大学病院  
令和7年12月23日

放射線機器安全管理責任者	安全管理担当者
越智 悠介	濱岡 晋吾

区分	購入	部門	放射線診断 一般撮影	使用室名	撮影室1		
保守点検実施状況	外部委託		外部委託の場合：認定証の有無			無	
医療機器名	Lunar iDXA						
製造業者	GEヘルスケア・ジャパン 本社						
販売業者							
保守点検連絡先 及び担当者名	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店						
	広島市安佐南区西原6-4-23				082-875-7800		
型式・名称	Lunar iDXA		製造・番号				
	X線骨密度測定装置						
定格							
使用開始年月日					設置後経過年数	0	年
直近の修理・ 点検状況							
保守点検実施 年月日	令和7年12月23日 14時0分 から				点検修理種別		
	令和7年12月23日 16時30分 まで				定期点検		
保守点検実施者名	GEヘルスケア・ジャパン 立会者 北川康子 合計 1人						
保守点検結果 及び概要							
保守点検後の装置 動作確認（放射線 量も含む）							
安全管理担当者	濱岡 晋吾		保守点検金額		0 円		

★本装置使用中は本書類及び添付文書・取扱説明書等は何時でも閲覧できる場所に保管する。



顧客情報

お客様: 国立大学法人広島大学病院 様  
 契約番号: --

装置情報

システムID: BMD00720 Serial No.: 213103MA  
 製品名: IDXA MLR  
 Asset tag #: -- Room Location: --

ケース

ケース番号: 16409034 ケースタイプ: Planned Maintenance

Work Order Details

WO Owner: Takaiso Yoshihiko WO Number: WO-18149003 WO Type: Field Service

Tube/Slice Count: --

現象: IDXA 2025年度スポット点検

作業内容: 点検を実施いたしました。  
 詳細は別紙の点検チェックシートをご参照ください。

- Software Version  
enCORE 18 SP4.1
- 装置IPアドレス  
10.151.30.71 / 16bit / DG:10.151.0.1
- PACS IPアドレス  
10.100.4.99 / STSV43 / 5901
- MWM IPアドレス  
10.100.4.109 / ARWORK / 8003
- システムID  
ME+213103
- Feature Code  
ME+9J6V5-68Y5N-HX8V7-3V7GH
- Activation Code  
A+78J66-8R68N-5J97
- Auxiliary Feature Code  
ME+0K5V7-77N5N-HH9A7-4V4GZ
- 設置環境  
同時曝射あり
- 接続オプションDICOM設定  
英語設定無し / 文字エンコード有効(IR87) / 半角カナエンコード有効(IR13)

動作確認: お客様ご指示のもとQCファントムブロックでのテストスキャンを3回行い、BMD値1.227のところ測定値は下記となり、スペックを満たしていることを確認しました。  
 L2-L4 BMD1:1.2220 / BMD2:1.2220 / BMD3:1.2230 / 平均:1.2223 / 誤差:-0.38% < ±2%

作業

Owner	タイプ	開始日時	終了日時	時間
Takaiso Yoshihiko	Planned Maintenance	2025 Dec 23 14:00	2025 Dec 23 16:30	02:30

パーツ

表示する項目がありません



作業担当者:

お客様サイン:

高 儀

安 部

作業者名:

お客様:

Takaiso Yoshihiko

日時:

日時:

23 Dec 2025 16:29

23 Dec 2025 16:29

本作業に契約時間を超える作業が含まれる場合は作業員からの説明をご確認の上、ご署名をお願いいたします

毎度格別のお引き立てを預かり厚くお礼申し上げます。

今回上記作業を完了しましたので、ご確認下さるようお願い申し上げます。

なお、修理の際取り外しました部品は品質改善の為持ち帰らせていただきますので、


ご了承下さるようお願い申し上げます。

フリーダイヤル 0120-055-919

**Company Information:**

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

〒191-8503 東京都日野市旭が丘4-7-127

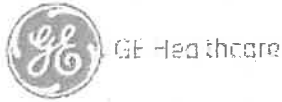

システム ID: BMD00720  
SR #: 16409034  
日付: 23Dec2025

DXA PM チェックリスト  
DXA PM CHECKLIST

お客様名: 広島大学病院 御中 サービス記録 #: 16409034  
システム ID またはシリアル番号 BMD00720 お客様機器 ID: NA  
走査テーブルのシリアル番号 213103MA ソフトウェアのバージョン: 18 SP4.1  
サービスマニュアルドキュメント番号: DXSE0012  
PM 周期: 12 ヶ月 PM ステータス complete

テスト (PM 作業指示については DXSE0012 を参照)  
TESTING (refer to DXSE0012 for complete PM work instructions)

PM タスク PM Task	結果 Results	コメント Comments
QA 履歴およびエラーログのレビュー QA History and Error Log reviewed	実施済み	
ホスト PC メンテナンスの実施 Host PC maintenance Performed	実施済み	
機械検査の実施 Mechanical Inspection Performed	実施済み	
ビームウォブルテスト実施および合格 Beam Wobble test performed and passed	合	
リミットスイッチの位置確認 Verify Limit Switch Positions	実施済み	
3 回の QA テストの実施および合格 3 Quality Assurance Tests Performed and passed	合	
アルミファントムスキャン3回実施および合格 3 Aluminum Phantom Scans Performed and passed	合	
DXAP5033 InSite 2.0 のインストール DXAP5033 InSite 2.0 Installation	該当なし	Insite未接続のため
ソフトウェアアップデートの要 / 不要に対する、お客様との確認 Verbal verification from customer that software update is/is not desired	実施済み	

ファントム結果  
PHANTOM RESULTS

ファントム S/N Phantom S/N	55753
基準値 Established Value	1.227



GE Healthcare

システム ID : BMD00720

SR # : 16409034

日付 : 23Dec2025

お客様署名 :

はい

必要無し

点検完了の最終確認

\* 完了日 : 23Dec2025